



Øjenmaske som former sig efter ansigtet og afhjælper symptomer ved:



VARM

- Dysfunktion af de meibomske kirtler (MGD) for eksempel blefaritis, tilstoppede kirtler og bygkorn
- Tørre øjne
- Forkølelse
- Bihulebesvær



KOLD

- Okuloplastik for eksempel øjenlåsoperation
- Hævede øjne
- Trætte øjne
- Allergi
- Røde øjne
- Hovedpine

MediPearl øjenmaske

Øjenmasken former sig efter dit ansigt og indeholder små perler af vand, glycerol og natriumpolyakrylat. Den er CE-mærket og betegnes som medicinsk udstyr. Materialet er helt frit for BPA, ftalater og latex.

Sådan gør du:

Øjenmasken anvendes på lukkede øjenlåg i mindst 10 minutter og ikke længere end 20 minutter. Har du brug for at gentage behandlingen, skal du vente 20 minutter. Masken rengøres med mildt rengøringsmiddel og kan genanvendes mange gange.

VARM behandling:

Opvarm øjenmasken i mikrobølgeovnen til den opnår en varm og behagelig temperatur. kontrollér altid at den ikke er for varm inden den lægges på øjenlågene. Følg instruktionerne på pakningen.

Anbefalet opvarmningstid afhænger af mikroovnens effekt:

700 W ~15 sek

1000 W ~12 sek

1250 W ~10 sek

KOLD behandling:

Opbevar øjenmasken i fryseren i mindst 2 timer.

