



VARM

- MGD
- Blefaritt
- Forkjølelse
- Tørre øyne
- Lipidmangel
- Bihule-plager



KALD

- Allergi
- Hodepine
- Røde øyne
- Trøtte øyne
- Hovne øyne
- Etter øyekirurgi

MediPearl øyemaske

Øyemasken inneholder små myke perler og former seg etter ansiktet. Perlene er laget av vann, glycerol og natriumpolyakrylat, materialet er helt fritt for BPA, ftalater og lateks. Masken er klassifisert som medisinsk utstyr.

Masken brukes på lukkede øyne i høyst 20 minutter om gangen. Ved gjentatte behandlinger skal det være minst 20 minutter pause mellom hver behandling. Masken rengjøres med mildt såpevann og kan gjenbrukes mange ganger.

VARM behandling: Øyemasken varmes i mikrobølgeovn til behagelig temperatur. Sjekk alltid at masken ikke er for varm før bruk. Les bruksanvisningen som er trykket på forpakningen og baksiden av masken.

Anbefalt oppvarmingstid er avhengig av mikrobølgeovens effekt:

700 W ~ 15 sek

1000 W ~ 12 sek

1250 W ~ 10 sek

KALD behandling: Øyemasken kjøles enkelt i fryseren i minst to timer.

