



VARM

- MGD
- Blefarit
- Lipidbrist
- Torra ögon
- Förkylning
- Bihålebesvär



KALL

- Allergi
- Huvudvärk
- Röda ögon
- Trötta ögon
- Svullna ögon
- Estetisk behandling

MediPearl ögonmask

Ögonmasken formas efter ditt ansikte och innehåller små mjuka pärlor av vatten, glycerol och natriumpolyakrylat. Det är en CE-märkt medicinteknisk produkt och materialet är helt fritt från BPA, ftalater och latex.

Så här gör du:

Ögonmasken används på stängda ögonlock i högst 20 minuter. Behöver man använda den igen ska man vänta tjugo minuter innan nästa behandling. Masken rengörs med mildt rengöringsmedel och kan återanvändas många gånger.

VARM behandling:

Värm ögonmasken i mikrovågsugnen tills den nått en varm och behaglig temperatur. Kom ihåg att alltid kontrollera att den inte är för varm innan användning. Läs instruktionerna på förpackningen.

Rekommenderad uppvärmningstid är beroende på mikrovågsugnens effekt:

700 W ~ 15 sek

1000 W ~ 12 sek

1250 W ~ 10 sek

KALL behandling:

Förvara ögonmasken i frysen i minst två timmar.

MediPearl säljs i 12-pack.

Beställ på HYLOSHOP
eller maila

order@medilensnordic.com



medilens